

## Présentation

La **PerfectDry** est un Dispositif Médical conçu pour la déshumidification et le rangement de tous types d'aides auditives.

Ses lignes modernes et épurées, associées aux meilleures technologies, en font un appareil exceptionnellement pratique d'utilisation.

Ses actions de déshumidification ont été prouvées par plusieurs tests indépendants.

## Spécifications

### Contrôle par microprocesseur

- Système de déshumidification.
- Arrêt automatique à la fin du cycle.



### Système de déshumidification par convection naturelle


- La température est contrôlée par microprocesseur pour ne pas excéder 40°C.
- Flux d'air optimisé et homogène.
- Extraction de l'humidité.

### Voyant lumineux (LED)

- Le cycle de déshumidification est indiqué par le voyant lumineux vert.

### Touche de contrôle unique

- Contrôle du lancement du cycle.
- Interruption du cycle par appui prolongé.

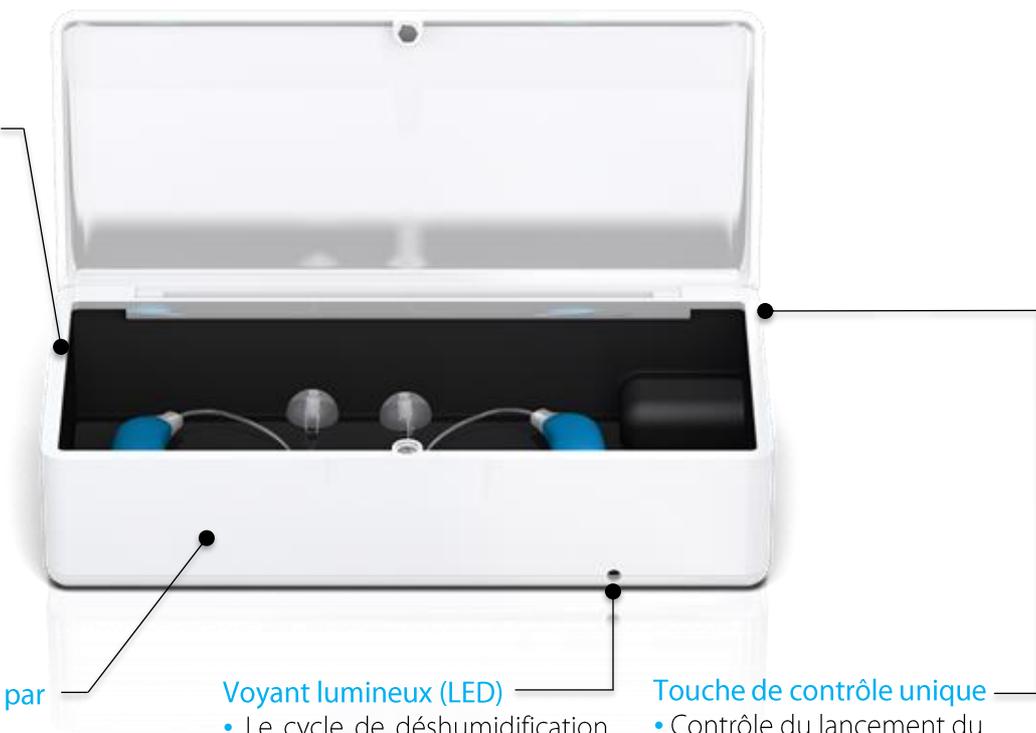

Evaporation	135 min.
Gouttes d'eau sur des aides auditives	40 mm <sup>3</sup>



Test à une température ambiante de 25°C et un taux d'humidité de 60%.


## Directives

Ce produit répond aux exigences de :

- Directive 93/42/EEC – Relative aux Dispositifs Médicaux, modifiée par la Directive 2007/42/CE.
- Directive 2014/35/EU – Harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

- Directive 2014/30/EU – Harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2011/65/EU – Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2012/19/EU – Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## Spécifications électriques

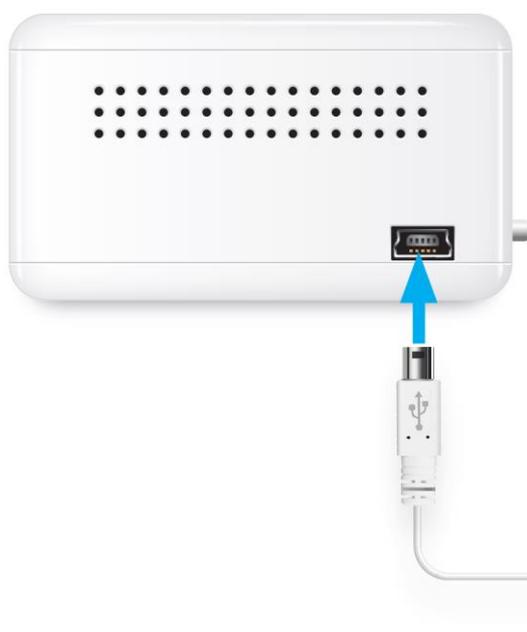

### Faible consommation

- Alimentation électrique : 5Vdc
- Puissance maximale : 2W
- Puissance en veille : <0.02W



### Adaptateur 5V

- Entrée : 100-240 Vac – 50-60Hz
- Sortie : 5Vdc / 1A
- Adaptateur certifié répondant aux exigences réglementaires.

## Spécifications mécaniques

- Dimensions internes (l x h x p) : 148 x 30 x 64 mm
- Poids : 126g



## Propriétés

La **PerfectDry** est un Dispositif Médical assurant une déshumidification optimale des aides auditives. Dans cette mesure, elle intègre un système électronique de pointe, notamment un microprocesseur visant à contrôler :

- **Le système de déshumidification.** Cette dernière est mise en œuvre grâce à un procédé de diffusion d'air chaud par convection naturelle. La température de la chambre d'entretien est contrôlée par le système électronique de manière à obtenir une température constante n'excédant pas 40°C quelle que soit la température ambiante afin de ne pas endommager les aides auditives à entretenir.

## Indications

La **PerfectDry** est indiquée pour déshumidifier tous les types de systèmes auditifs et embouts auriculaires afin d'éviter tout dysfonctionnement dû à l'humidité. Une utilisation régulière permet d'optimiser la durée de vie ainsi que la performance des aides auditives.

## Conseils d'utilisation

Nettoyer vos aides auditives afin d'enlever l'excès d'impuretés. Si cela est possible, ouvrez les compartiments de pile de vos aides auditives pour permettre une déshumidification totale, puis placez-les dans la **PerfectDry**.

Fermer le couvercle de la **PerfectDry**. Puis, appuyer sur la touche de contrôle pour lancer le cycle (2h15). Le voyant vert s'allume indiquant le bon fonctionnement du cycle.

La **PerfectDry** s'arrête automatiquement à la fin du cycle d'entretien (le voyant s'éteint).

## Précautions d'emploi

Poser la **PerfectDry** sur un support sec et stable. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser des produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer la **PerfectDry**. Ne pas vaporiser de liquide dans l'appareil.

Conserver la **PerfectDry** fermée lorsqu'elle ne sert pas afin d'éviter les dépôts d'impuretés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client, doit être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé.

Ne pas mettre la **PerfectDry**, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et changez les immédiatement.

Remplacez votre adaptateur secteur par le modèle d'origine.