



CE

Présentation

La **PerfectClean** est l'unique Dispositif Médical de nettoyage et de déshumidification de tous types d'aides auditives. Ses lignes modernes et épurées, associées aux meilleures technologies, en font un appareil exceptionnellement pratique d'utilisation. La **PerfectClean** maintient les performances optimales des aides auditives jour après jour.

Spécifications



Système de nettoyage

- Nettoyage par PowerVortex breveté.
- Elimination totale du cérumen et impuretés.




Solution nettoyante

- Dissolution du cérumen présent sur les aides auditives.



Système de séchage breveté par air pulsé

- La température est contrôlée par microprocesseur pour ne pas excéder $45 \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- Ventilation contrôlée.
- Flux d'air homogène et optimisé.
- Elimination de l'humidité.

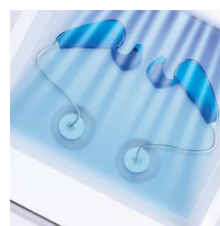

Système UV-C

- UV-C par onde courte (253.7nm).
- Aucun dommage sur les aides auditives.
- Arrêt automatique à l'ouverture du capot.

Voyant lumineux

- Bleu – clignotement lent > Marche
- Bleu – fixe > En veille
- Bleu – clignotement rapide > Recharger en solution
- Rouge – rapide > Défaut

Touche de contrôle unique

- Touche tactile avec repère incurvé


Directives

La **PerfectClean** répond aux exigences de :


- Directive 93/42/EEC – Relative aux Dispositifs Médicaux, modifiée par la Directive 2007/42/CE.
- Directive 2014 / 35 / EU – Harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

- Directive 2014 / 30 / EU – Harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2017 / 2102 / EU – Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2012 / 19 / EU – Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Test à une température ambiante de 25°C.

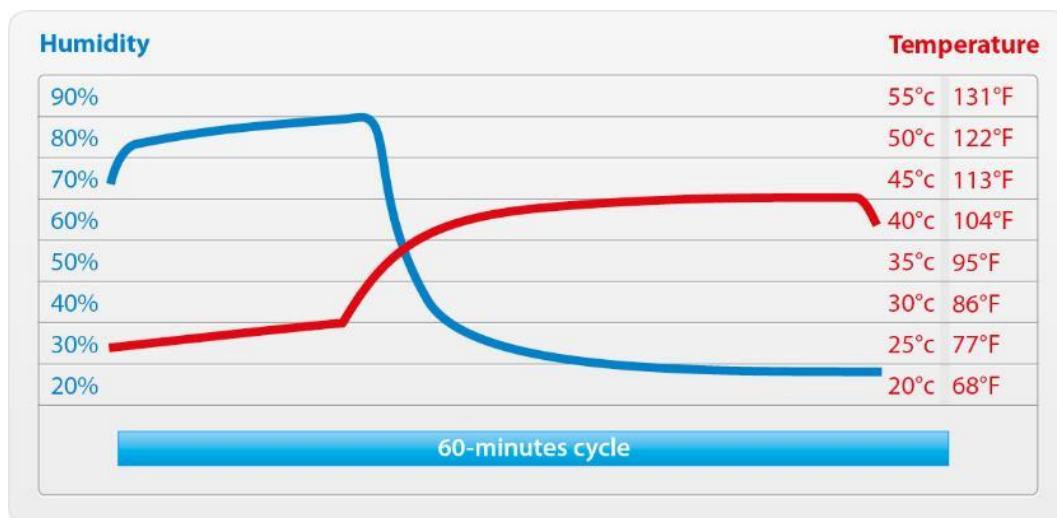

Spécificités électriques

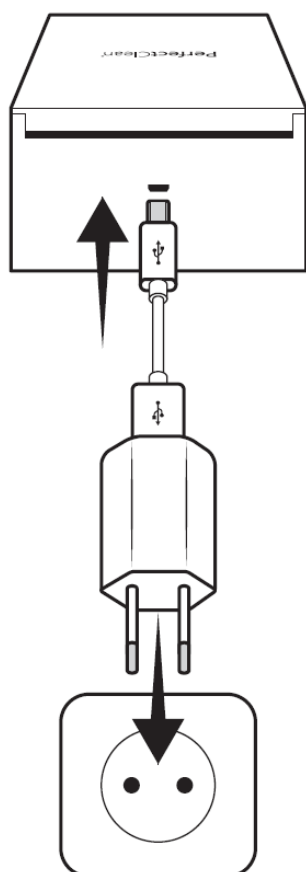

Faible consommation



- Alimentation électrique : 5Vdc
- Puissance maximale : 9W
- Puissance en veille : <0.04W

Adaptateur 5V

- Entrée : 100-240Vac / 50-60Hz
- Sortie : 5Vdc 10 W mini
- Adaptateur certifié répondant aux exigences réglementaires.

Spécificités mécaniques

- Dimensions internes (l x h x p) : 71 x 18 x 87 mm
- Poids : 400 gr

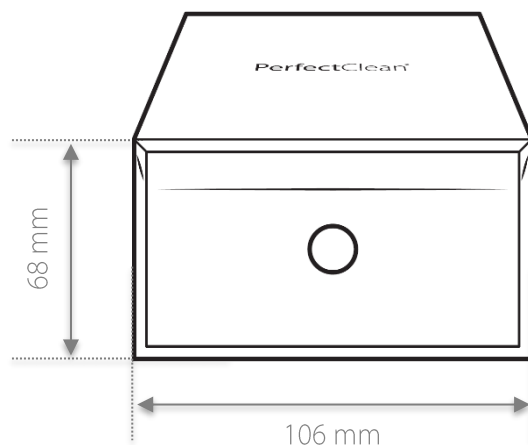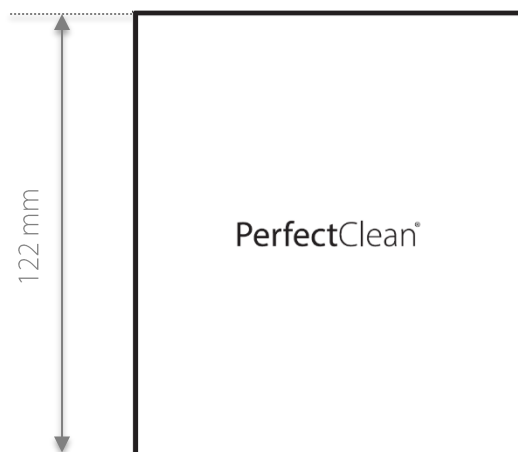

Propriétés

La PerfectClean est un Dispositif Médical unique qui combine trois technologies de pointe, indispensables au bon fonctionnement de tout type de systèmes auditifs : le nettoyage, la déshumidification et l'UV-C. Ces trois fonctions clés permettent aux utilisateurs de profiter jour après jour des meilleures performances de leurs appareils auditifs.

La PerfectClean intègre ainsi un micro-processeur qui permet de contrôler de manière optimale les différentes technologies associées :

• Nettoyage

La PerfectClean fonctionne avec une recharge de solution nettoyante qui assure une élimination totale du cérumen incrusté et des impuretés. De plus, la phase de nettoyage, dont l'efficacité a été prouvée par de nombreux tests, est optimisée par le système breveté du PowerVortex.

• Déshumidification

L'humidité est très souvent la cause des pannes qui privent les utilisateurs des aides auditives pendant plusieurs jours. De nombreux tests confirment l'efficacité du système de déshumidification de la PerfectClean sur tous les types d'aides auditives. La déshumidification est ainsi obtenue grâce à un système de diffusion d'air chaud pulsé par un ventilateur. La température de la chambre d'entretien est contrôlée par le système électronique de manière à obtenir une température constante n'excédant pas $45\pm 3^{\circ}\text{C}$ quelle que soit la température ambiante afin de ne pas endommager les aides auditives.

• UV-C

Le système d'UV-C à longueur d'onde courte permet d'atteindre l'ensemble des surfaces de l'aide auditive. Les essais réalisés par un laboratoire certifié permettent d'assurer que le système UV-C n'endommage pas les aides auditives.




Indications

La **PerfectClean** est indiquée pour nettoyer et déshumidifier tous les types de systèmes auditifs et embouts auriculaires afin d'éviter tout dysfonctionnement dû au cérumen, l'humidité et aux impuretés. Un usage quotidien garantit une durée de vie optimisée des aides auditives et assure leur efficacité.




Consignes d'utilisation

Recharger la **PerfectClean** uniquement lorsque le voyant l'indique. Utiliser la recharge complète. Veiller à fermer le capot avant de lancer le cycle, sans quoi la **PerfectClean** ne démarrera pas. Ne pas ouvrir le capot lorsque la **PerfectClean** est en fonctionnement. Une fois le cycle terminé, le voyant de la **PerfectClean** s'éteint automatiquement.

Nettoyage du filtre

1. Poser la **PerfectClean** sur la face avant (face avec le bouton de démarrage).
 2. Retirer le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu'à la position «  ».
 3. Rincer abondamment le filtre sous de l'eau chaude.
 4. Remettre le bouchon en position «  », et le tourner vers la droite jusqu'à la position «  ».
- Pour plus de précisions, se référer à la notice de la recharge.

Vidange (en vue d'un voyage ou d'un transport)

1. Poser la **PerfectClean** sur la face avant (face avec le bouton de démarrage).
2. Retirer le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu'à la position «  ».
3. Remettre la **PerfectClean** à plat, au-dessus d'un évier, afin d'évacuer le liquide restant.
4. Remettre le bouchon en position «  », et le tourner vers la droite jusqu'à la position «  ».

Précautions d'emploi

Ne pas laisser à la portée des enfants. Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client, doit être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé.

Ne pas mettre la **PerfectClean**, la câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et changez les immédiatement. Remplacez votre adaptateur secteur par un modèle d'origine.

Poser la **PerfectClean** sur un support plat, sec et stable. Ne jamais retourner ou incliner la **PerfectClean** même hors fonctionnement.

Ne pas regarder directement la lampe UV-C située dans la chambre d'entretien.

Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Ne jamais utiliser de produit détergent ou corrosif pour entretenir votre **PerfectClean**.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

Les aides auditives doivent être mises hors tension avant utilisation de la **PerfectClean**. Pour cela, il est très important d'ouvrir le compartiment des piles avant de déposer les appareils dans la **PerfectClean**.